



Biosynex


COVID-19 Ag BSS rychlý test

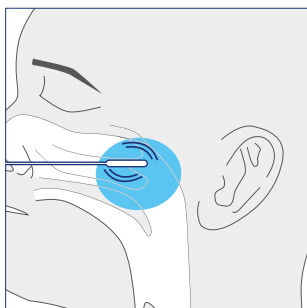


1 Vložte výtěrový tampón vodorovně do nosní dírky a dosáhněte povrchu zadního nosohltanu. Vytřete povrch. Tampónem několikrát otočte. Vyjměte.

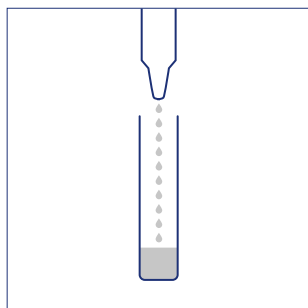


2 Do extrakční zkumavky přidejte 0,3 ml (10 kapek) extrakčního pufru.

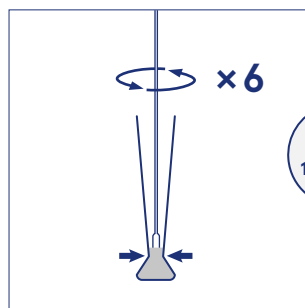


3 Vložte tampón do pufru v extrakční zkumavce a minimálně 6x jím otočte a současně ho mačkejte proti stěně extrakční zkumavky. Tampón ponechte ve zkumavce 1 minutu.

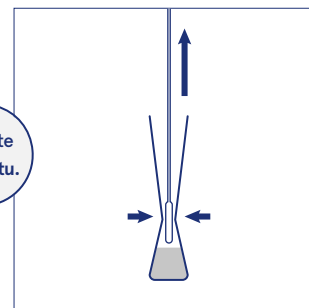


4 Při vyjímání tampónu současně stlačujte stěny zkumavky, abyste odstranili tekutinu z tampónu. Výtěrový tampón likvidujte podle místních pokynů.

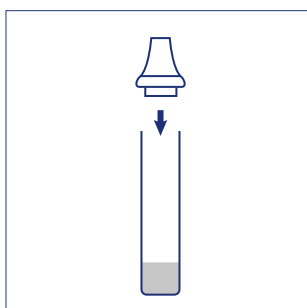

5 Nasad'te kapátko na extrakční zkumavku.

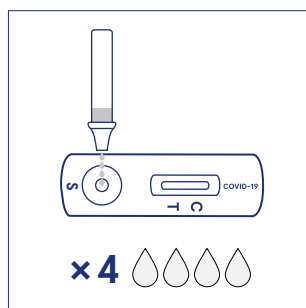

6 Stisknutím extrakční zkumavky nakapejte 4 kapky testovaného vzorku do okénka kazety (S).

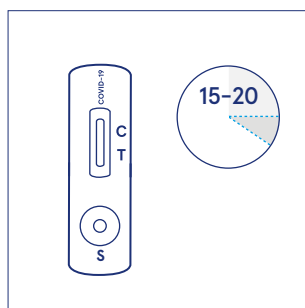


7 Po 15 minutách přečtete výsledek. Po 20. minutě již výsledek neinterpretujte.

Před provedením testu si prosím přečtete návod k použití.

Biosynex


COVID-19 Ag BSS rychlý test

Interpretace výsledků

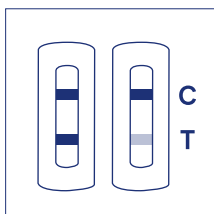


Pozitivní výsledek

Přítomnost dvou proužků – kontrolní linie (C) a testovací linie (T) – v okně výsledků znamená pozitivní výsledek.

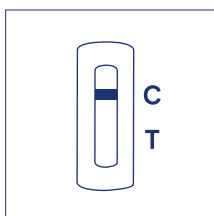

Negativní výsledek

Přítomnost pouze proužku kontrolní linie (C) v okně výsledků znamená negativní výsledek.

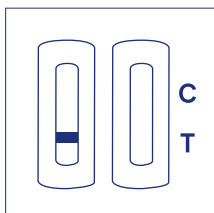

Neplatný výsledek

Pokud v okně výsledků po provedení testu není kontrolní proužek (C) vidět, výsledek je vyhodnocen jako neplatný. Možnou příčinou neplatného výsledku je nedodržení správného doporučeného postupu nebo používání testu po uplynutí doby použitelnosti. Je doporučeno vzorek znovu stanovit s použitím nového testu.

Nákladově efektivní a rychlá detekce antigenu SARS-2 ze vzorků z nosohltanu

Rychlost

- Výsledky do 15 minut

Vysoká přesnost

- V porovnání s PCR **relativní citlivost 96%** a **specifická 100%**

Snadná použitelnost

- Pouze pár kroků od odběru k výsledku
- Všechny požadované reagensie jsou součástí soupravy včetně potřebných výtěrových tampónů
- Skladování při pokojové teplotě (2–30°C)

Varování

- Pro transport nebo skladování nevracejte nikdy výtěrový tampón zpět do původního papírového obalu.
- Před provedením testu vytemperujte kazetu, testovaný vzorek a pufr na pokojovou teplotu (15–30°C).

Kontaktní informace

Aidian Oy, Finsko

Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

E-mail: info@aidian.cz / www.aidian.cz

Produkt	Číslo produktu	Kat. č.
Biosynex COVID-19 Ag BSS, 25 testů	SW4000605	154700

Pouze pro profesionální použití *in vitro*.